




Kiilto Pro Alu Deko

Maskinvaskemiddel til
sundhedssektoren

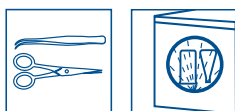

Flydende maskinvaskemiddel til instrumentvaskemaskiner og bækkenvaskere.

Anvendelsesområde Til instrumentvaskemaskiner og skyllemaskiner indenfor alle områder af sundhedssektoren. Alu Deko er specielt udviklet til maskinel vask af instrumenter, udstyr og materialer hyppigt anvendt i sundhedssektoren. Også velegnet til tandplejeudstyr og dentale instrumenter.

Medicinsk udstyr til professionel brug.

Produktegenskaber Ikke skummende maskinvaskemiddel. Velegnet til vask af sarte materialer som aluminium og plastik. Vaskeevnen er optimeret, så den imødekommer de høje krav i sundhedssektoren og kan opnås selv ved lav dosering.

Brugsanvisning Beholderen tilsluttes vaskemaskinens automatiske doseringssystem.
Anbefalet dosering: 0,3% svarende til 30-70 ml/vask.
Den optimale dosering afhænger af det materiale, der skal vaskes samt mængden og kvaliteten af vandet.

Når maskinen fyldes, er det vigtigt, at instrumenter og udstyr placeres, så alle overflader spules med vand. Placér slanger og andet udstyr, der er vanskeligt at rengøre, i separate holdere.

Anbefalet vasketemperatur: 45-55 °C.

Følg instruktionerne fra producenten af instrumenterne/udstyret.

Bemærkning Maskinen desinficerer termisk det rengjorte og skyllede udstyr samt maskinens indvendige dele i henhold til det valgte program. For at sikre et korrekt resultat, bør maskinens drift kontrolleres regelmæssigt.

Indhold

Ingrediens

Effekt

Kompleksbinder	5-15 %	Reducerer vandets hårdhed så produktet bliver mere effektivt
Polycarboxylat	< 5 %	Rengørende effekt, opløser snavs og binder det til vandet
Natriummetasilicat	< 5 %	pH-regulerende, opløser snavs og forhindrer korrosion
Phosphonater	< 5 %	Blødgør vandet, opløser snavs og forbedrer skylning

pH produkt

13.0

pH brugsopløsning

11.0

Opbevaring	Opbevares 5-35 °C. Holdbarhed: 3 år fra produktionsdato.			
Udseende og duft	Klar gullig væske.			
Produktionsland	FINLAND			
Anvendelses- og miljøsikkerhed	Alvorlige hændelser i forbindelse med produktet skal rapporteres til asiakaspalvelu@kiilto.com og den lokale myndighed for medicinsk udstyr (Lægemiddelstyrelsen). Læs brugsanvisning før brug. Sikkerhedsinstruktioner findes på produktets sikkerhedsdatablad.			
Emballagematerialer	Emballagen er fremstillet af HDPE plast som er et genanvendeligt materiale.			
Forpackningsstørrelse / Varenummer	Salgsenhed	Varenummer	GTIN	GTIN (salgsenhed)
	3 x 5 l	80387	6417964803877	6417964482577
				
Øvrig information	Tjek den senest opdaterede version af brochuren på vores hjemmeside www.kiilto.dk eller send en mail til kundeservice på info.dk@kiilto.com .			