




Alu Deko Maskinvaskemiddel

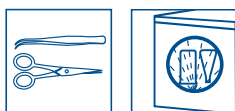

Flydende maskinvaskemiddel til desinfektionsvaskemaskiner og sengebækkenprocessorer til brug i sundhedsplejen.

Anvendelsesområde	Anvendes i automatiske desinfektionsvaskemaskiner og skyllemaskiner i alle områder af sundhedsplejen. Også egnet til tandplejeudstyr og -instrumenter. Til professionelt brug.
Produktegenskaber	Alu Deko er specielt udviklet til automatiseret vask af instrumenter, udstyr og hyppigt anvendte materialer i sundhedsplejen. Produktet skummer ikke og er egnet til vask af sarte materialer, som aluminium og plastik. Vaskeevnen er optimeret, så den imødekommer de høje krav i sundhedsplejen, og den kan opnås selv ved lav dosering.
Brugsanvisning	Beholderen kobles til vaskemaskinens automatiske dispenser. Anbefalet dosis er 30-70 ml/vask, afhængigt af maskinen, svarende til et indhold på ca. 0,3% vaskemiddel per vask. Den optimale dosis afhænger af materialet, der skal vaskes, samt vandkvaliteten. Når maskinen fyldes, er det vigtigt, at vanddyserne kan nå alle overfladerne af udstyret, der skal vaskes. Placér slanger og andet udstyr, der er svært at vaske, i separate beholdere. Anbefalet vasketemperatur: 45-55 °C.
Bemærkning	Følg instruktionerne fra producenten af de enkelte instrumenter. Varmen fra vaskemaskinen desinficerer det rengjorte udstyr samt de indvendige dele af maskinen, afhængigt af det valgte vaskeprogram. For at sikre et sikkert resultat, tjek med jævne mellemrum maskinens drift.

Indhold	Ingrediens		Effekt
	Ligand	5-15 %	Kompleksbinder vedrørende vandhårdhed.
	Polycarboxylat	< 5 %	Vaskepulver, opløser snavs og binder det til vandet.
	Natriummetasilicat	< 5 %	pH-regulator, opløser snavs og forhindrer korrosion.
	Phosphonater	< 5 %	Blødgør vand, opløser snavs og accelererer skylning.
pH produkt	13.0		
pH brugsopløsning	11.0		

Opbevaring

Opbevares ved stuetemperatur.
Holdbarhed: 3 år fra produktionsdato.

Udseende og duft

Klar gullig væske.

Produktionsland

FINLAND

**Anvendelses- og
miljøsikkerhed**

Læs altid etiket og produktinformation før brug.
Sikkerhedsinstrukser findes på produktets sikkerhedsdatablad.

**Forpakningsstørrelse Salgsenhed
/ Varenummer****Varenummer****GTIN****GTIN (salgsenhed)**

3 x 5 l

80387

6417964803877

6417964482577

1 x 20 l

8084

6412600080841

**Øvrig information**

Tjek den senest opdaterede version af brochuren på vores hjemmeside www.plum.dk eller send en mail til kundeservice på info.dk@kiilto.com.