

## DE: GESICHTSMASKE

**TYP IIR ZUGELASSEN NACH EN 14683**

### WIRD GEBRAUCHT FÜR:

Verbeugung gegen die Verbreitung von infektiösem Atem, Husten und Niesen. Schutz vor Einatmen von luftgetragenen Partikeln wie Staub, Pollen und übertragbaren Bakterien und Viren.

### GEBRAUCHSANWEISUNG:

1. Waschen Sie sich vor UND nach dem Tragen gründlich die Hände.
2. Halten Sie die Maske am oberen Rand, wo sich die Nasenklammer befindet. Die blaue Seite zeigt nach außen.
3. Legen Sie die Nasenklammer über den Nasenrücken und üben Sie Druck aus, um die Maske zu befestigen.
4. Halten Sie den Nasenbügel und ziehen Sie den unteren Rand der Maske vorsichtig nach unten, um die Maske zu erweitern.
5. Die Ohrbänder fest um die Ohren legen.
6. Die Nasenrückenklammer sanft um die Nase drücken, um einen festen Sitz und Haftung zu gewährleisten.
7. Spreizen und entfalten Sie die Maske, bis sie das Kinn vollständig bedeckt und keine Lücken zwischen den Wangen und dem Kinn sind.
8. In geschlossenem Behälter entsorgen.

### WARNUNG:

Nur zur einmaligen Verwendung. Nicht verwenden, wenn die Maske verschmutzt oder kaputt ist. Von kleinen Kindern fernhalten. Unsteril.

Jeder schwerwiegende Zwischenfall, der in Zusammenhang mit dem Artikel aufgetreten ist, sollte dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Mitgliedstaates, in dem der Anwender und/oder Patient niedergelassen ist, gemeldet werden.



D20108P-IFU  
2020-03



**RFX+CARE**<sup>®</sup>

RFX+CARE Manufacturing Co., Ltd.  
7 Lanjiang Road, Yuecheng District,  
Shaoxing, Zhejiang, China 312000

EC REP

RFX+Care International A/S  
Bakkegaardsvej 408, 3050  
Humlebæk, Denmark



**MD** Medical device



REF D20108P

17,5 x 9,5 CM

LOT XXXXX

XXX

**1**  
**PC.**