

DK: ANSIGTSMASKE

TYPE IIR GODKENDT I HENHOLD TIL EN 14683

ANVENDELSESFORMÅL:

Forebyggelse mod spredning af smitsom åndedræt, hoste og nys.
Beskyttelse mod indånding af luftbårne partikler såsom støv, pollen og transmitterbare bakterier og vira.


BRUGSANVISNING:

1. Vask hænderne grundigt før OG efter brug.
2. Tag fat i masken i den øverste kant, hvor næseklemmen mærkes og med den blå side udad.
3. Placer næseklemmen over næseryggen, og tryk på for at fastgøre masken.
4. Hold næseklemmen forsigtigt, og træk den nedre kant af masken nedad for at udvide masken.
5. Placer ørestrengene godt rundt om ørerne.
6. Tryk forsigtigt på næsebroklemmen omkring næsen for at sikre en tæt pasform og vedhæftning.
7. Spred og fold ud, indtil det dækker hagen fuldstændigt, uden at der er mellemrum mellem maske kinderne og hagen.
8. Bortskaf i lukket skraldespand.

ADVARSEL:

Kun til engangsbrug. Brug ikke, hvis masken er beskadiget eller ødelagt. Hold dig væk fra små børn. Ikke steril.
Enhver alvorlig hændelse, der har fundet sted i forbindelse med enheden, skal rapporteres til producenten og den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor brugeren og / eller patienten er etableret.

Tag fat i masken i den øverste kant, hvor næseklemmen mærkes og med den blå side udad.

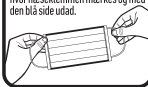

Placer klemmen over næseryggen, for at fastgøre masken.



Tryk forsigtigt på klemmen for at sikre en tæt vedhæftning.



VASK HÆNDERNE
GRUNDIGT FØR OG
EFTER BRUG.



RFX+CARE

RFX+CARE Manufacturing Co., Ltd.
7 Lanjiang Road, Yuecheng District,
Shaoxing, Zhejiang, China 312000

EC REP

RFX+Care International A/S
Bakkegaardsvej 408, 3050
Humlebæk, Denmark



MD Medical device



REF D20108P

17.5 x 9.5 CM

LOT XXXXX

XXX

**1
PC.**



D20108P-IFU
2020-03

